




Snore Circle

Soluciones Antironquidos

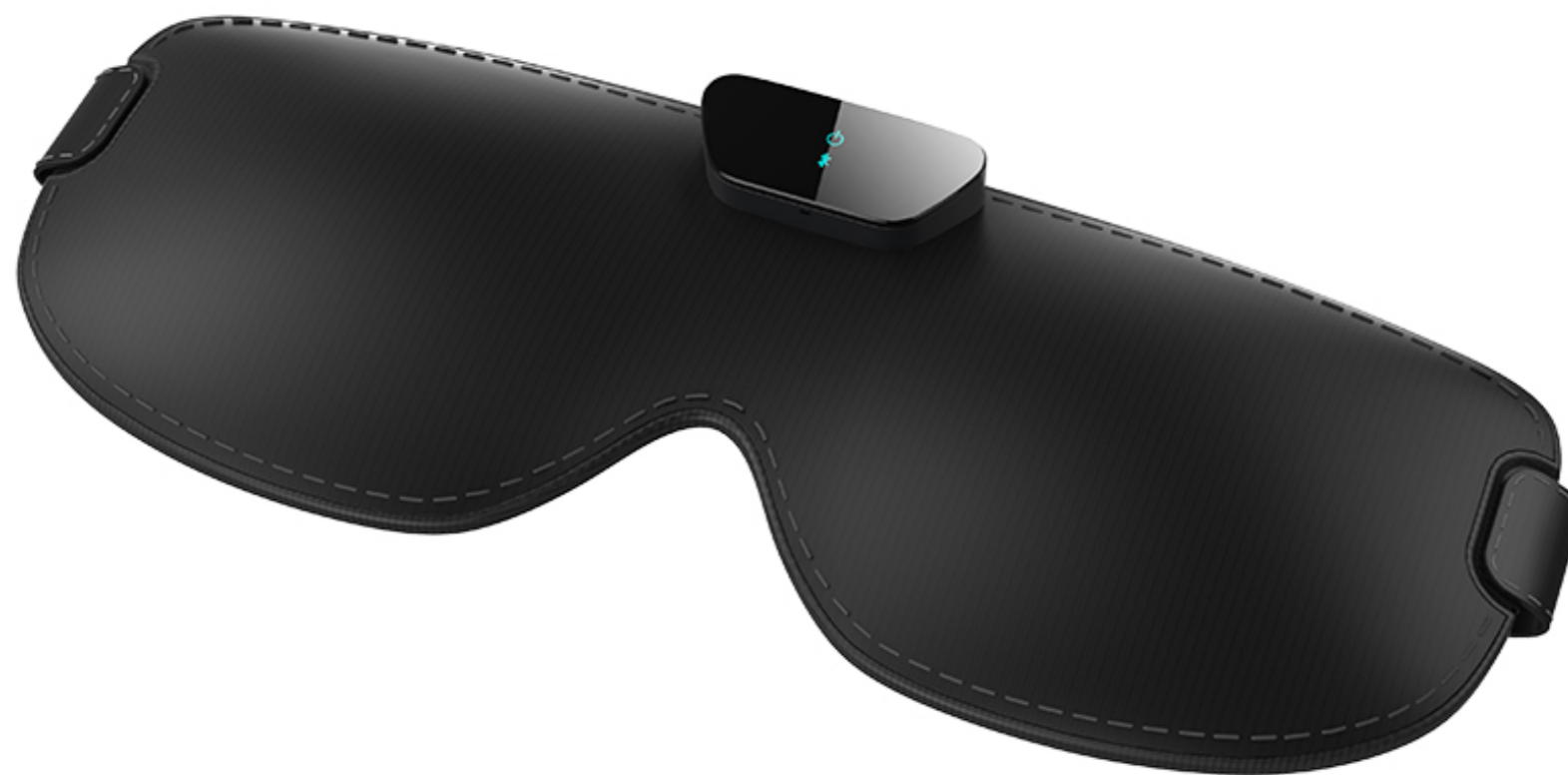

Instrucciones



Comprobar el buen funcionamiento de la máscara Snore Circle:

Después de encender el producto y llevarlo puesto, inicie continuamente un sonido de ronquidos en un ambiente tranquilo y podrá notar una leve vibración.

Visualización de la batería:

Mientras el producto está encendido, simplemente pulse el botón FUNC para confirmar el nivel de carga de la batería y compruebe el color de la luz LED de encendido.

1. La luz de encendido en rojo significa que la batería está baja, por favor recárgala. Recomendamos, cárgalo antes de usarlo. De lo contrario, podría apagarse automáticamente.
2. La luz de encendido en verde significa que la batería está cargada.
3. Puede obtener el porcentaje restante exacto de la batería conectándose con la aplicación Sleepus en su Smartphone.



Recomendaciones sobre la batería:

1. La batería de litio recargable incorporada se puede cargar a través de los cargadores de teléfono y de la conexión USB del ordenador.
2. Se puede cargar completamente en dos horas. Después de una carga completa, la batería dura dos noches. Sugerimos que las personas con alta cadencia de ronquido lo carguen todos los días.
3. Una vez que está la batería completamente cargada, el indicador de encendido se mantiene verde.



Encendido:

Ponga la pestaña en ON para encender el equipo.

Después de encenderlo, el indicador de Bluetooth parpadeará durante 10 segundos. El flash desaparecerá si no se conecta a tu teléfono.

Después de comprobar que el indicador de alimentación permanece verde, póngase la máscara y acuéstese para descansar.

Para mantener a todos dormidos y evitar molestias de luz, el LED de encendido se apagará automáticamente.

Es muy importante que se asegure de que la unidad principal esté bien pegada a la frente.

Apagado:

Ponga la pestaña en la posición OFF para apagar el dispositivo. Y todas las luces indicadoras se apagarán.

Sugerencia técnica:

Si el producto no se usa correctamente, afectaría la precisión del reconocimiento del ronquido y la intervención física.

Por lo tanto, una vez que el producto esté encendido, úselo correctamente de acuerdo con las siguientes instrucciones.





Principio de funcionamiento:

1. El producto detecta e identifica* con precisión los sonidos del ronquido a través de la tecnología de conducción ósea.
2. Una vez que el ronquido es reconocido, nuestro producto inteligente ofrece intervención física* via unas leves vibraciones, prácticamente imperceptibles a los usuarios que duermen.
3. Para constatar si este producto mejora su sueño, puede además de su propia percepción o de las observaciones de familiares, grabar y estudiar el nivel de intensidad o la frecuencia de los ronquidos a través de la App y por último constatar sus progresos.

Importante: nos permitimos recordarle aquí que “cuidar su ronquido” es una tarea muy importante para su salud pero que necesita higiene de vida, ánimo y paciencia (como una dieta alimenticia). Sea perseverante.

*el producto se entrega con sus ajustes correspondiente a la mejor eficacia para una población de roncador estándar. Los umbrales de detección (sensibilidad), de acción (intensidad de micro-vibración) y el plazo de actuación (retraso de la función de acción sobre todo para permitir un mejor adormecimiento al principio de la noche) son ajustables, via la App, con el fin de adaptarse a cada caso.



Conexión con la aplicación:

La aplicación **Sleeplus** está disponible en:

Sistema iOS: Iphone 4S o posterior

Sistema Android: 4.3 o posterior, con Bluetooth 4.0

Cómo descargar la aplicación:

iOS: abrir App Store y buscar “**Sleeplus**”.

Android: abrir Google Play y buscar “**Sleeplus**”.

Características de la aplicación de **Sleeplus**:

Podrá:

- ver los tiempos de ronquidos, los tiempos de intervención y la tasa de paro de ronquidos.
- ver la calidad de su sueño con una tabla, un gráfico y un cuadro detallado.
- ver los archivos históricos de ronquidos.
- ajustar la intensidad y sensibilidad de la intervención física, o activar la función de retardo de parada de ronquidos para personalizar el producto.



Cómo usar la aplicación:

1. Una vez instalada la aplicación, encienda el Bluetooth de su Smartphone y abra la aplicación. Mientras tanto, asegúrese de que el dispositivo esté encendido y pulsa el botón FUNC para iniciar el Bluetooth que parpadeará de color azul. Enlace el producto con su teléfono via la App y podrá ver las grabaciones de sus ronquidos y la calidad de su sueño a través de la aplicación.

2. Configura su modo de trabajo ideal para el dispositivo:

Es posible que el modo predeterminado* no sea adecuado para todos. Recomendamos realizar ese ajuste (5 niveles diferentes para cada uno de los umbrales de detección, el plazo de intervención y de intensidad de las micro-vibraciones) por cuenta propia a lo largo de los primeros días de utilización del producto, en función de la intensidad de sus ronquidos, del ambiente (quizás ruidoso, por ejemplo viaje en avión) y de sus hábitos de sueño.

3. Para las personas con sueño ligero, se recomienda no intervenir físicamente durante el primer ciclo de sueño ligero. Al activar la función de retardo de parada de ronquidos, el producto no interfiere con su adormecimiento.

*el producto se entrega con sus ajustes correspondientes para que sea eficaz para un usuario con ronquidos estándar. Los umbrales de detección (sensibilidad), de acción (intensidad de micro-vibración) y el plazo de actuación (retraso de la función de acción sobre todo para permitir un mejor adormecimiento al principio de la noche) son ajustables, via la App, con el fin de adaptarse a cada caso.



Servicio Postventa:

1. La garantía es de dos años a partir de la fecha de compra original para todo el producto.
2. Los daños artificiales están fuera de garantía. **Cuidado: toda intervención del dispositivo anulará la garantía.**
3. En el momento de juzgar la eficacia de nuestro producto, le recomendamos prolongar su uso durante mínimo dos semanas, sin interrupción. En efecto, un 10% de usuarios necesitan un periodo de adaptación al producto para solventar algunas dificultades como la sensación de despertar o de presencia de un cuerpo extraño. Una personalización de los ajustes puede, también, ser necesaria.

Importante: nos permitimos recordarle aquí que “cuidar su ronquido” es una tarea muy importante para su salud pero que necesita higiene de vida, ánimo y paciencia (un poco como una dieta alimenticia). Sea perseverante.

Precauciones:

1. Use y almacene el producto dentro de un rango de temperatura específico de -10°C a 50°C. La temperatura extrema puede causar un mal funcionamiento del producto.
2. Aleje el producto de todo tipo de fuentes de calor, como calentadores, microondas o asadores.
3. Mantenga el producto alejado de golpes o vibraciones fuertes, ya que podría dañarlo.
4. **Nunca limpiar el producto con productos químicos, detergentes o agua.** Manténgalo siempre seco.
5. **Nunca intervenir sobre el producto**, retirar o sustituir la batería de litio incorporada en el producto. Puede dañar el producto y conlleva la anulación de la garantía. No arrojar el producto al fuego, puede provocar una explosión.
6. **Esto no es un juguete. Por favor, coloque en un lugar adecuado y manténgalo fuera del alcance de los niños** para no exponerles a los peligros de un uso indebido.



Cuanto más utilice Snore Circle, más eficaz será.

Puede tardar unos días en acostumbrarse al funcionamiento de Snore Circle y a las posibles microvibraciones antes de notar al despertarse la sensación de “acordarse” de su acción benéfica.

Se dará cuenta con el tiempo que la sensación de molestia diminuta poco a poco para dejar sitio a esa sensación de que Snore Circle mejora la calidad de su sueño y controla sus ronquidos.

En la fase de aprendizaje, una personalización de los ajustes suele ser necesaria. Puede cambiar, en todo momento via la App, los ajustes la intensidad de la vibración (5 niveles diferentes para cada uno de los umbrales de detección, para el plazo de intervención y para la intensidad de las microvibraciones).

Gracias por confiar en el equipo de Snore Circle

www.snorecircle.es