




Snore Circle

Solutions anti-ronflements

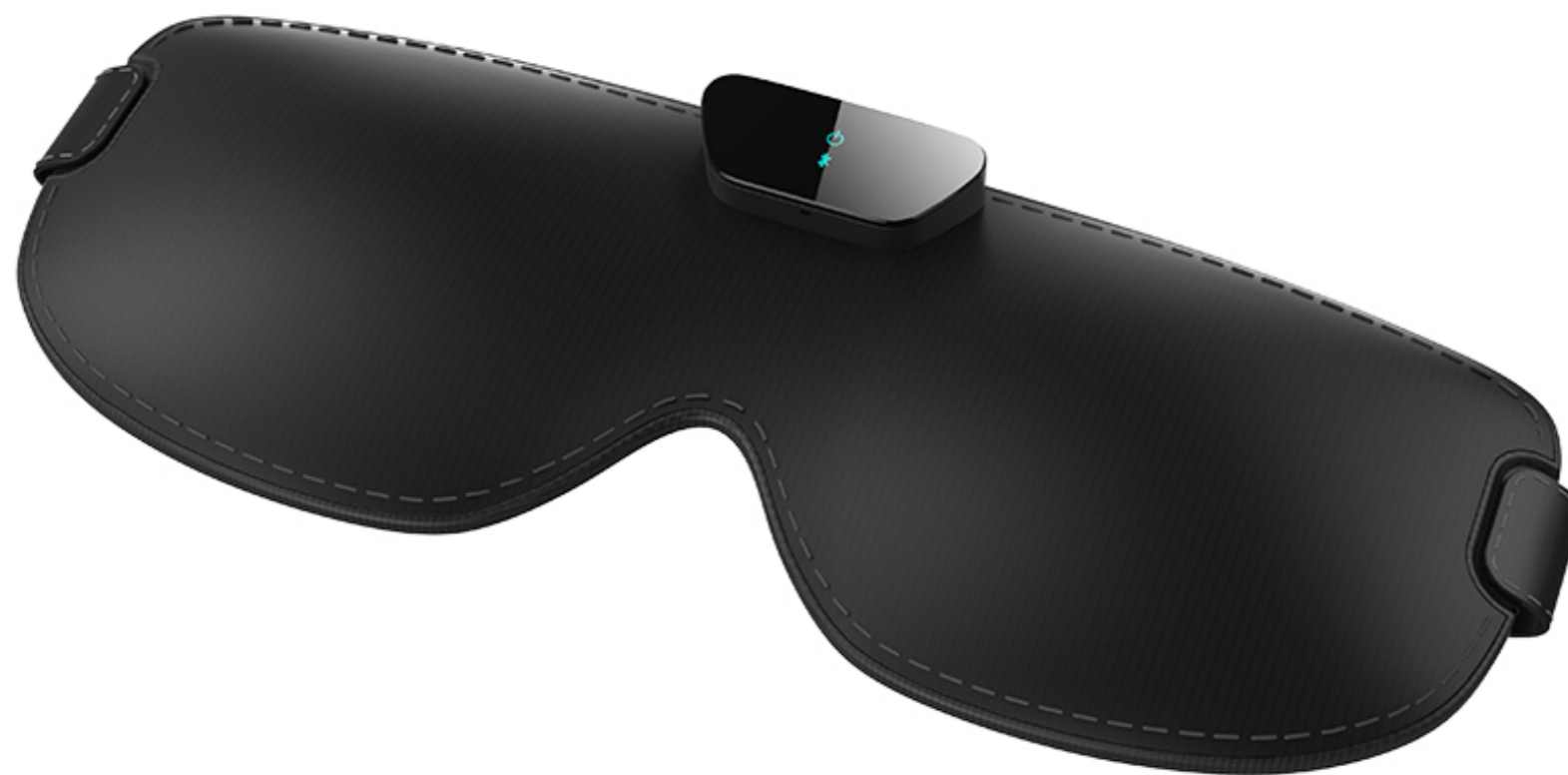

Instructions



Vérifier que Snore Circle fonctionne correctement:

Après avoir allumé le produit et l'avoir porté, simulez un ronflement, en continu, dans un environnement calme et vous pourrez ressentir une faible vibration.

Affichage de la batterie :

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez simplement sur le bouton FUNC pour confirmer le niveau de charge de la batterie et vérifier la couleur du voyant d'alimentation.

1. Le voyant d'alimentation rouge indique que la batterie est faible, veuillez la recharger. La charge avant utilisation est recommandée. Sinon, l'appareil pourrait s'éteindre automatiquement.
2. Le voyant vert indique que la batterie est chargée.
3. Vous pouvez obtenir le pourcentage exact de charge de la batterie en vous connectant à l'application Sleepus sur votre Smartphone.



Recommandations concernant la batterie:

1. La batterie au lithium rechargeable intégrée doit être rechargée via les chargeurs de téléphone ou la connexion USB d'un ordinateur.
2. La batterie est complètement chargée en deux heures. Après une charge complète, la batterie peut durer deux nuits. Nous suggérons cependant que les personnes ayant une cadence de ronflement élevée, sollicitant beaucoup l'appareil, la rechargent tous les jours.
3. Une fois que la batterie est complètement chargée, l'indicateur d'alimentation reste vert.



Allumer le masque:

Positionner l'interrupteur sur ON pour allumer l'équipement.

Après la mise sous tension, le voyant Bluetooth clignote pendant 10 secondes. Le flash disparaît s'il n'est pas connecté à votre téléphone.

Après avoir vérifié que l'indicateur d'alimentation reste vert, mettez le masque et allongez-vous pour vous reposer.

Pour ne pas gêner d'autres dormeurs et éviter les nuisances lumineuses, la LED d'alimentation s'éteint automatiquement.

Il est très important de s'assurer que le module de détection est bien en contact avec le front.

Éteindre le masque:

Placez l'interrupteur sur la position OFF pour éteindre l'appareil. Tous les voyants s'éteignent.

Suggestion technique :

Si le produit n'est pas utilisé correctement, cela affectera la précision de la reconnaissance du ronflement et de l'intervention physique. Par conséquent, une fois le produit allumé, utilisez-le correctement en suivant les instructions suivantes.





Principe de fonctionnement:

1. Le produit détecte et identifie* avec précision les ronflements grâce à sa technologie de reconnaissance de la conduction osseuse.
2. Une fois le ronflement reconnu, ce produit intelligent délivre une intervention physique* via des micro-vibrations, pratiquement imperceptibles pour les utilisateurs endormis.
3. Pour constater que ce produit améliore la qualité de votre sommeil, vous pourrez, en plus de votre propre perception ou des observations de votre entourage, enregistrer et étudier le niveau d'intensité ou la fréquence de vos ronflements via l'application et finalement constater vos progrès.

Important: nous nous permettons de vous rappeler ici que "soigner son ronflement" est une tâche très importante pour votre santé mais qui nécessite hygiène de vie, courage et patience (un peu à l'image d'un régime alimentaire). Soyez persévérant.

* le produit est livré avec ses réglages correspondants à la meilleure efficacité pour une population de ronfleurs type. Les seuils de détection (sensibilité), d'action (intensité des micro-vibrations) et de délai d'action (retardement de la fonction d'action essentiellement pour permettre un meilleur endormissement en début de nuit) sont réglables, via l'Application, afin de s'adapter à chaque cas particulier.



Connexion à l'application :

L'application **Sleeplus** est disponible sur :

Système iOS: Iphone 4S ou posterior

Système Android: 4.3 ou posterior, avec Bluetooth 4.0

Comment télécharger l'application :

iOS: aller à l'App Store et chercher "**Sleeplus**".

Android: aller à Google Play et chercher "**Sleeplus**".

Caractéristiques de l'application **Sleeplus** :

Vous pourrez :

- voir les temps de ronflement, les temps d'intervention et le taux d'arrêt du ronflement.
- voir la qualité de votre sommeil avec un tableau, un graphique et un tableau détaillé.
- voir les archives historiques du ronflement.
- régler l'intensité et la sensibilité de l'intervention physique, ou activer la fonction de délai d'arrêt du ronflement pour personnaliser le produit.



Utilisation de l'application:

1. Une fois l'application installée, activez le Bluetooth de votre Smartphone et ouvrez l'application. Assurez-vous également que l'appareil est allumé et appuyez sur le bouton FUNC pour démarrer la LED bleue du Bluetooth (elle clignote). Couplez le produit à votre téléphone via l'application et vous pourrez alors voir les enregistrements de vos ronflements et la qualité de votre sommeil grâce à l'application.

2. Configurez le mode de réglage idéal pour votre appareil :

Le réglage par défaut* peut ne pas convenir à tout le monde. Nous vous recommandons d'ajuster ce réglage (5 niveaux différents pour chacun des seuils de détection, de délai d'intervention et d'intensité des micro-vibrations) par vous-même au cours des premiers jours d'utilisation du produit, en fonction de l'intensité de vos ronflements, de votre environnement (éventuellement bruyant, par exemple voyage en avion) et de vos habitudes de sommeil (endormissement difficile).

3. Pour les personnes ayant un sommeil léger, il est meilleur de ne pas intervenir pendant le premier cycle de sommeil léger. En activant la fonction de délai de l'émission de vibration, le produit n'interfère pas avec votre endormissement.

* le produit est livré avec ses réglages correspondants à la meilleure efficacité pour une population de ronfleurs type. Les seuils de détection (sensibilité), d'action (intensité des micro-vibrations) et de délai d'action (retardement de la fonction d'action essentiellement pour permettre un meilleur endormissement en début de nuit) sont réglables, via l'Application, afin de s'adapter à chaque cas particulier.



Service Après Vente:

1. Nos produits sont garantis deux ans à compter de la date d'achat.
2. Les dommages accidentels ne sont pas garantis. **Attention: toute intervention sur l'appareil annulerait la garantie.**
3. Au moment de juger de l'efficacité de notre produit, nous vous recommandons de prolonger son utilisation sur une durée minimum de deux semaines, sans interruption. En effet, environ 10% des utilisateurs nécessitent une période d'adaptation au produit pour surmonter quelques difficultés comme la sensation de réveil ou de présence d'un corps étrangers. Une personnalisation des réglages peut, également, être nécessaire.

Important: nous nous permettons de vous rappeler ici que "soigner son ronflement" est une tâche très importante pour votre santé mais qui nécessite hygiène de vie, courage et patience (un peu à l'image d'un régime alimentaire). Soyez persévérant.

Précautions à prendre:

1. Utiliser et entreposer le produit dans la plage de température spécifique de -10°C à 50°C. Des températures extrêmes peuvent provoquer un dysfonctionnement du produit.
2. Éloigner l'appareil à proximité de toute source de chaleur, comme les appareils de chauffage, les micro-ondes ou les grils.
3. Eviter les chocs ou les vibrations violentes, car cela pourrait l'endommager.
4. **Ne jamais nettoyer le produit avec des produits chimiques, des détergents ou de l'eau.** Le garder toujours au sec.
5. **Ne jamais intervenir sur le produit**, retirer ou remplacer la batterie au lithium intégrée. Cela pourrait endommager le produit et entraînerait la perte de la garantie. Ne pas jeter le produit dans un feu, sous risque d'explosion.
6. **Ce produit n'est pas un jouet. Veuillez le placer dans un endroit approprié et le garder impérativement hors de portée des enfants** pour ne pas les exposer aux dangers d'une utilisation inappropriée.



Plus vous utilisez Snore Circle, plus il sera efficace.

Cela vous prendra probablement quelques jours pour vous habituer au fonctionnement de Snore Circle et à des micro-réveils éventuels avant de commencer à éprouver, au réveil, la sensation de "vous souvenir" de son action bénéfique.

Avec le temps les sensations de gêne diminueront peu à peu pour laisser place à ce ressenti que Snore circle améliore la qualité de votre sommeil et contrôle vos ronflements.

Dans la phase d'apprentissage, une personnalisation des réglages est souvent nécessaire. Vous pouvez modifier, à tout moment via l'Application, les réglages (5 niveaux différents pour chacun des seuils de détection, de délai d'intervention et d'intensité des micro-vibrations).

Merci de faire confiance à l'équipe de Snore Circle

www.snorecircle.fr